

## CHORUS PROMONITOR ANTI-USTEKINUMAB

**Katalogové číslo:** 86713

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



### Obsahové informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagenty (ready-to-use) nezbytné k provedení vyšetření.
- Kalibrace je obsažena v balení.
- Hodnocení výsledků pomocí IU/ml, AU/ml nebo Indexu positivity.

### Stručný pracovní postup:

1. Načtení čárových kódů vzorku a typu testu.
2. Manuální pipetování vzorku.
3. Vložení testu do přístroje.
4. Spuštění přístroje.
5. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na <http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/>