

Název:	Anchor® Tips, 300 µl
Účel:	Nádoby používané k přepravě vzorku z laboratorní nádoby do kyvety s automatizovaným pipetovacím systémem v jednotce hodnocení KleeYa jednorázové
Identifikační č.:	Anchor® Tips, 300 µl – identifikační č.: 10036506
Jednotky balení:	Anchor® Tips, 300 µl, sada 5760 kusů
Materiál:	PP pro lékařské účely

1 ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ

Zamýšlené použití je jako nádoba pro přenos kapalin.

Anchor® Tips jsou určeny výhradně k jednorázovému použití a k aplikaci kvalifikovaným personálem. Anchor® Tips jsou navrženy k použití s automatizovaným pipetovacím systémem v přístroji KleeYa, v souladu s diagnostickými analýzami *in vitro*.

INFO

Anchor® Tips, jsou validovány pro použití s přístrojem KleeYa. Jako příslušenství k přístroji KleeYa jsou klasifikovány jako zdravotnické prostředky IVD A s ohledem na nařízení EU IVD 2017/746. Při používání špiček v přístroji KleeYa je prokázána shoda s příslušnými obecnými požadavky na bezpečnost a funkčnost.

Další informace o Anchor® Tips, 300 µl, naleznete v uživatelské příručce systému KleeYa.

⚠ WARNING



Zacházení

Tento pokyn slouží pro vaši bezpečnost a poskytuje důležité instrukce pro zacházení s výrobkem.

- Přečtěte si veškeré pokyny (včetně uživatelské příručky systému KleeYa)!
- Nepoužívejte poškozený výrobek!
- Nepoužívejte žádný výrobek s poškozeným přímým obalem!
- Nepoužívejte žádný výrobek, po uplynutí data expirace!
- Nikdy nepoužívejte opakovaně jednorázový výrobek! Opakované použití jednorázových výrobků může způsobit křížovou kontaminaci. Navíc již není zaručena správná funkčnost produktu.

2 SPECIFIKACE

Jmenovitý objem: 300 µl

Jmenovitá délka: 55 mm

3 POUŽITÍ

Se dvěma nezávislými zásuvkami pro zásobníky na Anchor® Tips je možné nepřetržité doplňování špiček a tím nepřetržitý provoz systému KleeYa.

Každou zásuvku lze naplnit jedním zásobníkem na Anchor® Tips s 96 špičkami v každém z nich. Software systému KleeYa monitoruje vkládání do zásobníků.

Zásobníky na Anchor® Tips se vkládají do prostoru pro vkládání špiček systému KleeYa. Prostor pro vkládání špiček má kapacitu pojmout až dva zásobníky na špičky.

Další návod k použití naleznete v uživatelské příručce systému KleeYa „3.3.3 Vkládání a vyjímání špiček Anchor® Tips“.

4 PODMÍNKY PROSTŘEDÍ

Teplota



Provoz: 18 °C až 37 °C (64,4 °F až 98,6 °F)

Skladování: 2 °C až 32 °C (35,6 °F až 89,6 °F) maximálně po dobu 2 let

Přeprava: -10 °C až 60 °C (14 °F až 140 °F) maximálně po dobu 3 dnů

Vlhkost



Provoz: 20 – 80 % nekondenzující

Skladování: 20 - 80 % nekondenzující, maximálně po dobu 2 let

Přeprava: 10 - 90 % nekondenzující, maximálně po dobu 3 dnů

NOTICE

Chraňte před slunečním světlem a UV zářením!

5 LIKVIDACE A DEKONTAMINACE

NOTICE

Likvidace nekontaminovaných dílů

Nepoužívaný materiál (např. obalový materiál, jednotky s poškozeným přímým obalem) by měl být řádně zlikvidován v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.

⚠ WARNING



Likvidace kontaminovaných dílů

Potenciální infekční materiál způsobí závažné znečištění prostředí.

Striktně dodržujte místní a národní stanovení, legislativu a laboratorní předpisy.

6 PODPORA

NOTICE

E-mail: Support.KleeYa@diatron.com

7 VÝROBCE



STRATEC Consumables GmbH

Sonystrasse 20

5081 Anif

Rakousko

Internet: www.stratec.com/solutions/consumables

