

## BlueDiver Dot Polymyositis/Scleroderma8 IgG

**Katalogové číslo:** PMS8DIV-24

**Velikost balení:** 24 testů

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** D-tek s.a.



### Informace o soupravě:

- Každý jednotlivý test obsahuje všechny reagentie (ready-to-use) nezbytné k provedení testu.
- Antigeny jsou nanášeny na membránu, v případě přítomnosti specifických protilátek dochází k jejich vazbě na jednotlivé separované antigeny. V následujících krocích jsou navázané protilátky označeny konjugátem a detekovány barevnou reakcí se substrátem.
- Krátké inkubační doby, celková doba vyšetření je asi 1,15 hod.
- Vyhodnocení pomocí programu Dr. DOT.
- Expirace 12 měsíců od data výroby.

### Stručný pracovní postup:

- Vložení testovacích stripů a zásobníků do přístroje BlueDiver.
- Pipetování vzorků.
- Plně automatizované inkubační a promývací kroky v BlueDiver:
  1. Inkubace 30 min.
  2. Promytí 3 × 2 min.
  3. Dávkování Konjugátu.
  4. Inkubace 10 min.
  5. Promytí 3 × 2 min.

6. Dávkování substrátu.
  7. Inkubace 10 min.
  8. Promytí 1 × 2 min.
- Vyhodnocení testu ve skeneru BlueScan pomocí softwaru Dr. DOT.