

CHORUS CAMPYLOBACTER JEJUNI CONTROL SERUM

EAN kód: 8033891323042

Katalogové číslo: 85895

Velikost balení: 0,5 ml

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.



Obecné informace o výrobku:

- Kontrolní materiál na bázi lidského séra obsahující specifické protilátky v deklarovaném titru.
- Slouží k vyhodnocení přesnosti a správnosti použití přístroje Chorus.

Stručný pracovní postup:

1. Inaktivace kontrolního séra 30 min. při 56 °C.
2. Načtení čárových kódů kontrolního séra a typu testu.
3. Manuální pipetování kontrolního séra.
4. Vložení testu do přístroje.
5. Spuštění přístroje.
6. Tisk výsledků v průběhu 60-90 minut.

Aktuální verzi návodu naleznete na: <http://www.diesse.it/en/Products/linea:41/>