

## CHORUS SANITIZING SOLUTION 4x20 ml

**Katalogové číslo:** 83608

**Skladování:** 2-8 °C

**Výrobce:** DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.

### Stručný pracovní postup:

1. V menu CHECK zvolte SANIT.
2. Postupujte podle pokynů na monitoru.
3. Doba provedení dezinfekce je 2 hodiny.
4. Tento postup opakujte jednou týdně.

Aktuální verzi návodu naleznete na <http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/>