

CHORUS SANITIZING SOLUTION 1x20 ml


EAN kód: 8033891328849

Katalogové číslo: 83604

Velikost balení: 1 x 20 ml

Skladování: 2-8 °C

Výrobce: DIESSE Diagnostica Senese S.p.A.

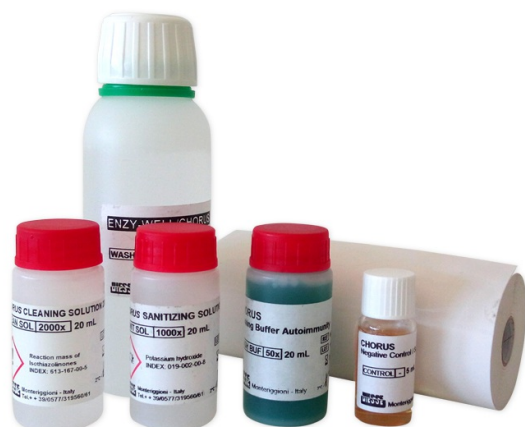

Stručný pracovní postup:

1. V menu CHECK zvolte SANIT.
2. Postupujte podle pokynů na monitoru.
3. Doba provedení dezinfekce je 2 hodiny.
4. Tento postup opakujte jednou týdně.

Aktuální verzi návodu naleznete na <http://www.diesse.it/en/Products/linea:40/>