

AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag
Sputum



Rychlá a efektivní

SARS-CoV-2 Antigen

detekce ze sputa (hlenu)



AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag Sputum


AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag Sputum je rychlý, imunochromatografický test pro kvalitativní stanovení antigenu Nucleocapsid Protein viru SARS-CoV-2 ve sputu neboli hlenu, který slouží jako rychlá a efektivní diagnostika infekce COVID-19. Díky detekci nukleokapsidového proteinu nemají nové mutace viru vliv na účinnost testu.

Test je určen pouze pro profesionální zdravotnické použití, nicméně jeho použití nevyžaduje žádné laboratorní vybavení a odběr vzorku je oproti odběru z nazofaryngu neinvazivní.

Díky dostupnosti výsledku během 15 minut je test cenným nástrojem pro efektivní screening u suspektních případů infekce způsobené virem SARS-CoV-2.

Srovnávací klinická studie s RT-PCR prokázala vysokou citlivost a specifitu testu.

Potencionální zkřížená reaktivita byla testována na celé řadě běžných patogenů; koncentrace, při nichž nebyla zkřížená reaktivita zjištěna, jsou uvedeny v návodu k použití.

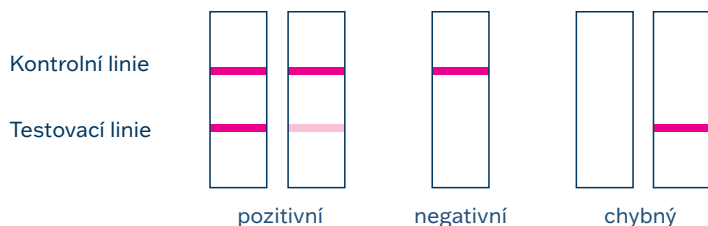

Vzorek:	Sputum
Odečtení výsledku:	15 – 20 minut
Detekční limit:	1.15×10^2 TCID ₅₀ /mL
Charakteristiky:	srovnání s RT-PCR
Citlivost:	92,2 % (95% CI: 86,1% - 96,6%)
Specifita:	100,0 % (95% CI: 98,5% - 100%)
Celková shoda:	96,7 % (95% CI: 94,7% - 98,2%)

Interference: Nebyla detekována interference s EDTA, antiviroty, antibiotiky, antibakteriálními léčivými spreji a kapkami, nazálními kortikosteroidy.

Složení soupravy: individuálně balené testovací kazety, trychtýř pro odběr vzorku, extrakční zkumavky, kápatko, pipeta, extrakční pufr, držák na zkumavky, biologicky bezpečný sáček.

Objednací údaje

Katalogové číslo	Název	Typ vzorku	Balení
RT3950	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag Sputum	Odběr ze sputa	1 test
RT3951	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag Sputum	Odběr ze sputa	10 x 1 test
RT3952	AMP Rapid Test SARS-CoV-2 Ag Sputum	Odběr ze sputa	20 testů



Výrobce

AMEDA Labordiagnostik GmbH

Krenngasse 12, 8010 Graz, Austria

Tel.: +43 316 69 80 69 | Fax: +43 316 69 80 69 12

E-mail: office.graz@amp-med.com

www.amp-diagnostics.com



Distributor

TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Křižíkova 68, 612 00 Brno, Česká republika

Tel.: +420 549 121 205 (209, 238) | Fax: +420 541 243 390

E-mail: trade@testlinecd.com

www.testlinecd.cz